

鼻腔スワブ採取用 ウェルサイン抗原検査キット 検査説明書

製品名：ウェルサイン™-COVID19 Ag

販売元：ウェルサイン株式会社 (Welsign Co., Ltd.)
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町12-7
Mail: service@welsign.co.jp
HP: https://welsign.co.jp/

研究用 本製品は体外診断用医薬品ではありません。
診断・治療目的には使用できません。

1. 準備


手を洗い、必要であればアルコール等で消毒します。

2. 開封

箱またはビニール袋の中から検査試薬の入った検体用キャップ付きチューブ
(①+②+③)、綿棒 (④)、検査キット (⑤) を取り出し並べます。


※開封してから1時間以内に検査を終了させてください。

3. 採取

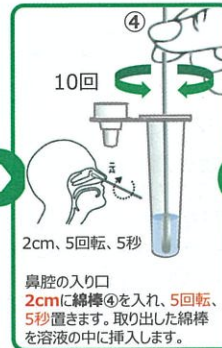

試薬が皮膚や目に付かないよう注意してください!!!

例：陽性の場合


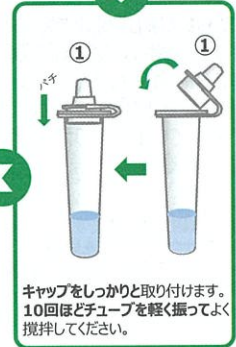


4. 判定

(15分後)



15 mins

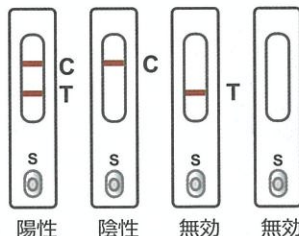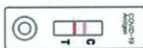

C: コントロールライン

T: テストライン (結果判定用)

【保管方法・使用期間の目安】
2~30℃の冷暗所保管で2年間安定

※夏期などは、高温多湿は避けてください。
※長期間保存の場合には冷蔵を推奨します。

5. 終了後

密封できるビニール袋に入れて一般ゴミで廃棄してください。
(陽性の場合：密封したまま医療、検査機関に持参してください。)